



Guía rápida de la App PARI Connect

Conexión inicial de la App PARI Connect y el eTrack® Controller al iniciar sesión por primera vez

1. Comprueba en los ajustes del sistema de tu móvil si está activado el Bluetooth
2. Comprueba si PARI Connect tiene acceso a Bluetooth

Android:

- » Abre el icono de ajustes del sistema y vete a "Aplicaciones"
- » Selección "PARI Connect"
- » Concede el permiso a la App para que pueda acceder a tu ubicación

iOS:


- » Abre los ajustes del sistema y selecciona "PARI Connect"
- » Activa el Bluetooth

3. Enciende el eTrack® Controller y con la tecla (☑) navega hasta el modo de transferencia de datos



4. Confirma la selección del menú con la tecla (☑)


Aparece el PIN en la pantalla

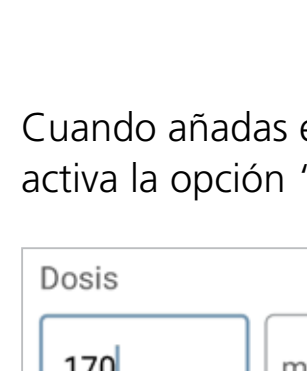


5. Abre PARI Connect y selecciona en la App el eTrack® Controller con el que quieres conectar la App
6. Introduce el PIN en la App
 - » Se conectarán la App y el eTrack® Controller

Introduce tus fármacos inhalados en el Plan de Tratamiento y transfírelos al eTrack® Controller


1. Utiliza el icono del calendario en la vista general para empezar a introducir nuevos planes de tratamiento.

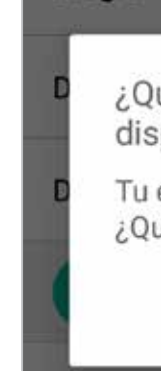

2. Haz clic en el símbolo "+" para agregar un nuevo fármaco al plan de tratamiento.

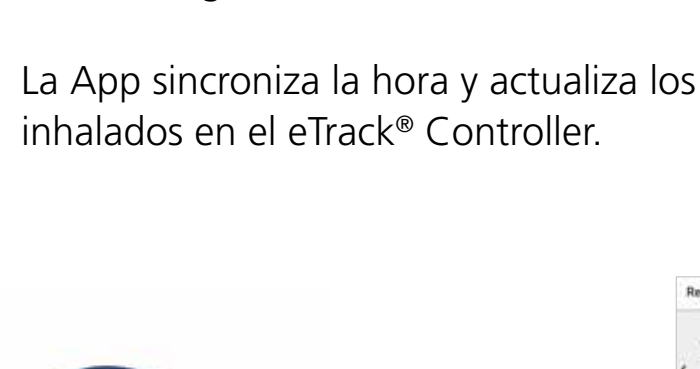

3. Cuando añadas el nombre del fármaco inhalado, activa la opción "Transferir al eTrack® Controller"

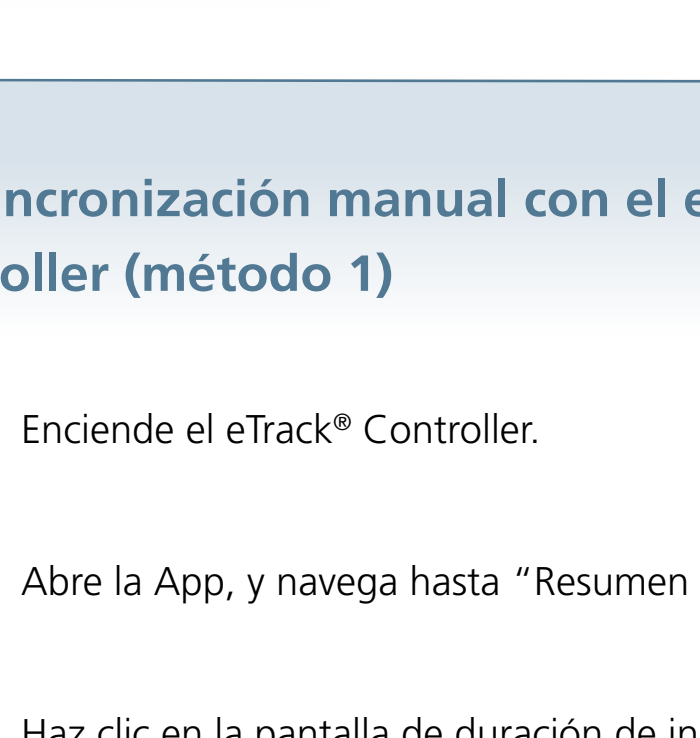


4. Sincroniza la App y el eTrack® Controller para que el nuevo fármaco se muestre en tu eTrack® Controller (consulta la página siguiente).

Sincronización automática con el eTrack® Controller


- » Cuando la App y el eTrack® Controller están encendidos y los datos están guardados en el controller, la App te pregunta si deseas sincronizar.

- » **Confirma la sincronización**

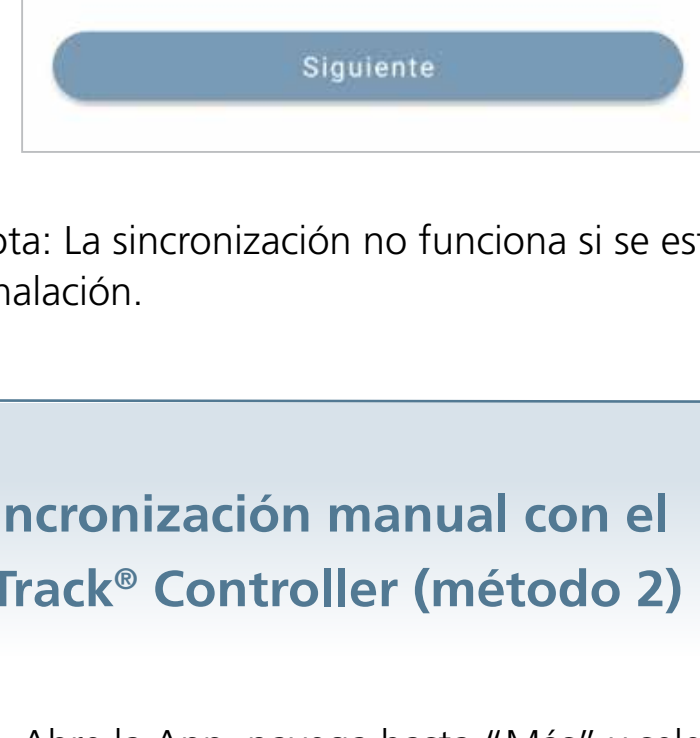

- » La App recoge los datos sobre la inhalación del eTrack® Controller y marca la inhalación programada en la vista general.

- » La App sincroniza la hora y actualiza los fármacos inhalados en el eTrack® Controller.

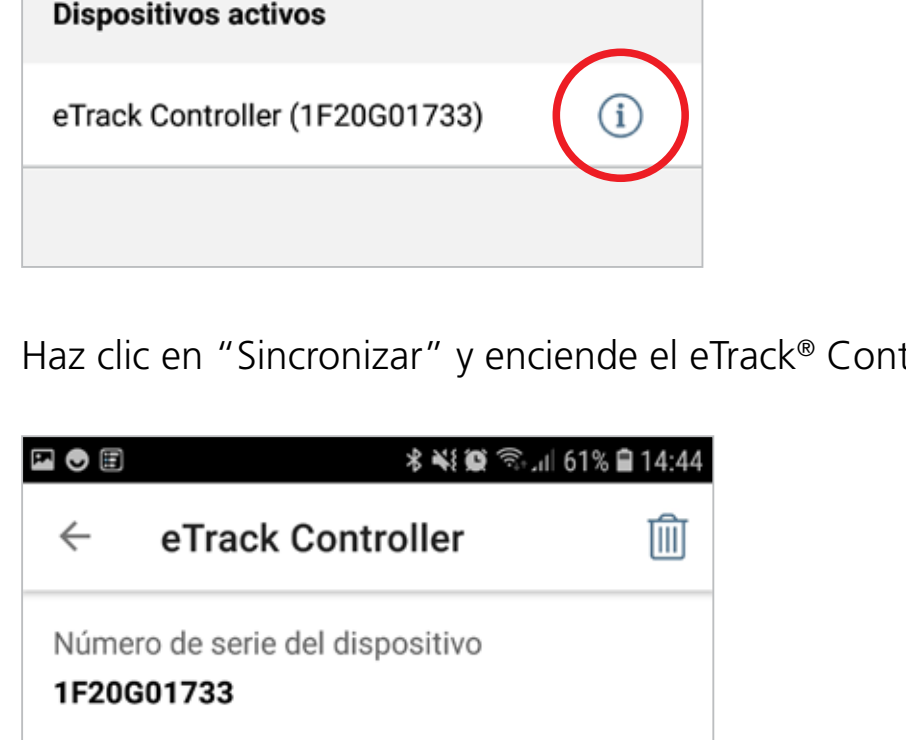


Sincronización manual con el eTrack® Controller (método 1)


1. Enciende el eTrack® Controller.

2. Abre la App, y navega hasta "Resumen diario".

3. Haz clic en la pantalla de duración de inhalación.
 - » Para iniciar la sincronización, se puede hacer clic en cualquier punto de la pantalla de duración de inhalación.

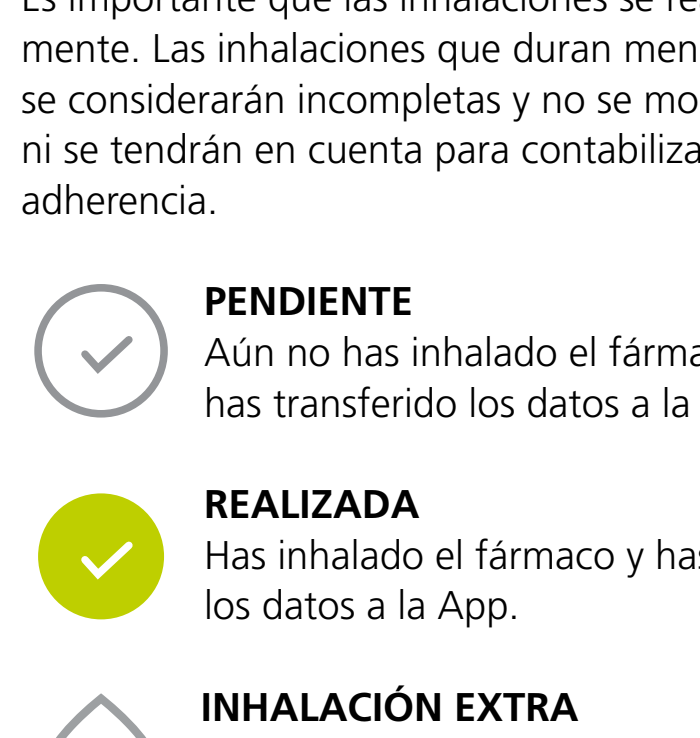

4. La App indica que se está sincronizando. A continuación se confirma que la sincronización ha finalizado correctamente.

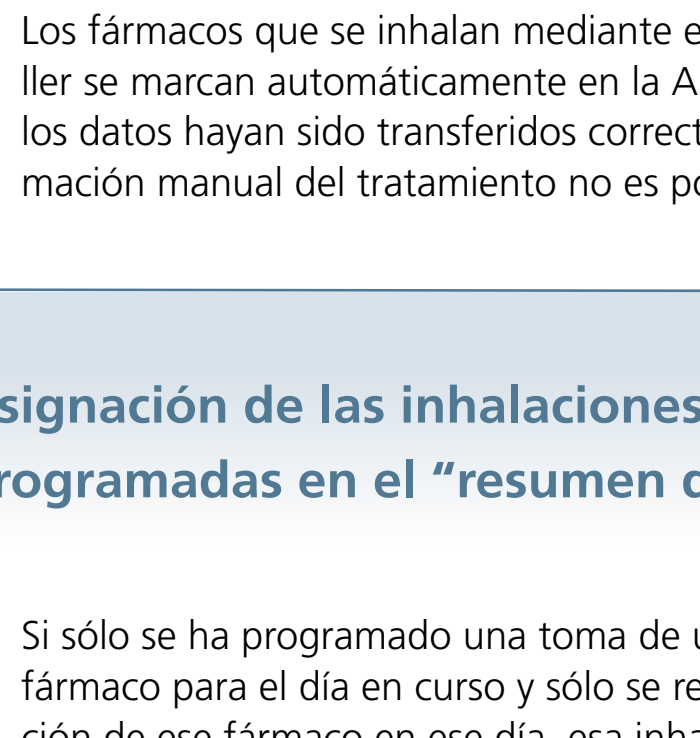


Nota: La sincronización no funciona si se está realizando una inhalación.

Sincronización manual con el eTrack® Controller (método 2)

1. Abre la App, navega hasta "Más" y selecciona "Vista general del dispositivo"


2. Haz clic en el icono de información que se encuentra junto a eTrack® Controller

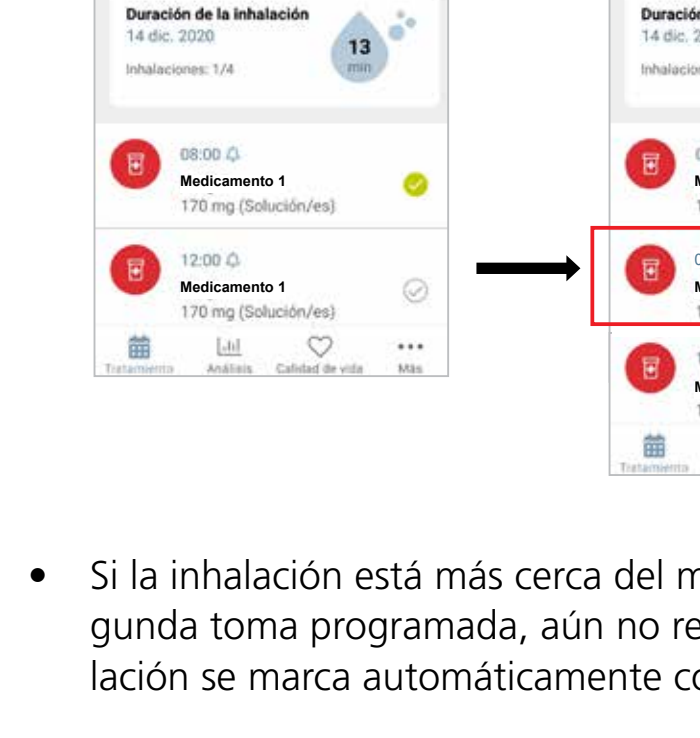

3. Haz clic en "Sincronizar" y enciende el eTrack® Controller



- » La App indica que se está sincronizando. A continuación se confirma que la sincronización ha finalizado correctamente.

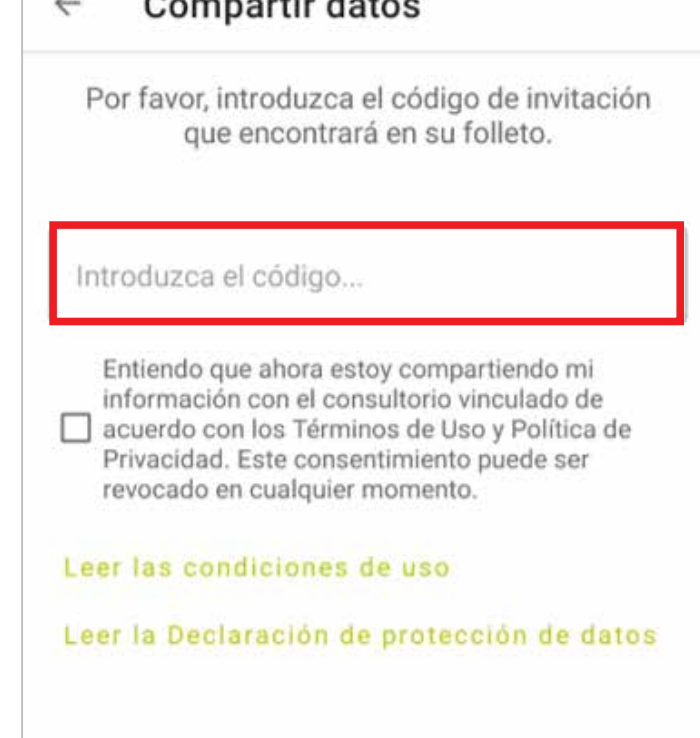


Estado de los datos transferidos por el eTrack® Controller

- » Es importante que las inhalaciones se realicen completamente. Las inhalaciones que duran menos de 60 segundos se considerarán incompletas y no se mostrarán en la App ni se tendrán en cuenta para contabilizar el cálculo de la adherencia.




PENDIENTE

Aún no has inhalado el fármaco o no has transferido los datos a la App.

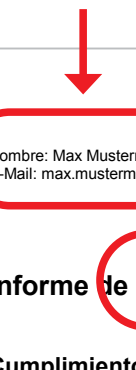


REALIZADA

Has inhalado el fármaco y has transferido los datos a la App.

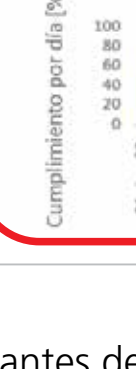

INHALACIÓN EXTRA

Has realizado más inhalaciones del fármaco de las que habías programado.

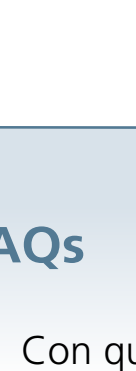

OLVIDADO

Has olvidado inhalar el fármaco o no has transferido los datos a la App.

- » Los fármacos que se inhalan mediante el eTrack® Controller se marcan automáticamente en la App después de que los datos hayan sido transferidos correctamente. La confirmación manual del tratamiento no es posible.

Asignación de las inhalaciones a las tomas programadas en el "resumen diario"

- » Si sólo se ha programado una toma de un determinado fármaco para el día en curso y sólo se registra una inhalación de ese fármaco en ese día, esa inhalación se asignará a la toma programada, independientemente de la hora del día, y se marcará automáticamente en el resumen diario.

- » Si no se ha programado ninguna toma para el día en curso y sin embargo realizas una inhalación, aparece en el resumen diario con el estado "Inhalación extra".

- » Si hay dos tomas programadas para el día en curso y has realizado una inhalación antes de la primera, o entre las dos tomas programadas, la inhalación realizada se asignará a la primera toma programada y se marcará automáticamente.

- » Si hay dos inhalaciones programadas para el día en curso, de las cuales la primera ya se ha realizado y realizas otra inhalación que se encuentra entre estas dos inhalaciones programadas, la App comprobará si esta inhalación está más cerca de la primera inhalación programada o más cerca de la segunda inhalación programada:

- Si la inhalación se aproxima más al momento de la primera toma marcada como realizada, esta inhalación aparece con el estado "Inhalación extra" en la App.

- Si la inhalación está más cerca del momento de la segunda toma programada, aún no realizada, esta inhalación se marca automáticamente como "realizada".

Compartir datos

1. Haz clic en "Más" y selecciona "Compartir datos".

2. Introduce el código de invitación y confirma que quieres compartir tus datos. Haz clic en "Compartir datos".
 - » El código de invitación se encuentra en el impreso que has recibido del médico con el que quieres compartir tus datos.

3. La activación de tus datos se confirma en la App.

Advertencias sobre los informes de la App

Los informes que puedes enviar desde la App son como el ejemplo siguiente. Por motivos de privacidad en los informes, además de los contenidos que has seleccionado (plan de tratamiento, adherencia al tratamiento farmacológico), solo se indica tu nombre y la dirección de e-mail registrados en la App.

Ejemplo de un informe (datos ficticios)

Nombre y dirección de e-mail que indicaste al registrarte en la App

Contenidos seleccionados previamente por ti (por ejemplo, adherencia a la terapia inhalada)

Si antes de compartir tu informe con alguien lo quieres ver, envíatelo a tu correo electrónico primero. Solo después compártelo con otras personas. Puedes añadir un mensaje si es necesario.

FAQs

1. Con qué versiones de Android e iOS es compatible la App?

- Versión de Android 8.0+
- Versión de iOS 13.0+

2. Qué puedo hacer si tengo dificultades para conectar el eTrack® Controller a la App o para transferir datos del eTrack® Controller a la App?

- Comprueba la configuración de tu smartphone para asegurarte de que el Bluetooth está activado. Asegúrate de que la aplicación tiene permiso para acceder al Bluetooth.
- Sólo para usuarios de Android: Comprueba la configuración de tu smartphone y asegúrate de que el permiso de ubicación está activado. Asegúrate de que la aplicación puede acceder a la ubicación.
- Asegúrate de que el modo de ahorro de energía está desactivado.
- Puedes intentar restablecer la aplicación de la siguiente manera: "Ajustes" > "Aplicaciones" > "PARI Connect" > "Almacenamiento" > "Borrar datos".